

# OURS

Bediening van de kuitsteunen van het Affinity™ 4-bed

Volg deze **vier eenvoudige stappen** om de kuitsteunen van het Affinity 4-bed snel en gemakkelijk aan te passen



1

## Out

Knijp in de ontkoppelingshendel van de voetsteun en klap de voetsteun helemaal **uit**.



2

## Up

Duw de voetsteun helemaal naar de zijkant en **omhoog**.



3

## Release

**Ontkoppel** de hendel van de kuitsteun en draai de kuitsteun naar een horizontale positie.\*



4

## Secure

**Bevestig** de kuitsteun door de hendel omhoog te trekken totdat deze parallel is met de vloer.

\*Opmerking: zoek naar drukpunten en maak de juiste aanpassingen. Draai de kuitsteun om voor LANGE PATIËNTEN.

Voor meer informatie over dit product of een dienst kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Hill-Rom-vertegenwoordiger of onze website bezoeken:

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**