

## AANBEVOLEN WERKWIJZEN

### Progressa®-matrassen

Het is van essentieel belang dat de huid van patiënten op de IC wordt beschermd. Daarom biedt het Progressa®-bedsysteem een ruime keuze aan matrasopties om:

- immobiliteitsgerelateerde complicaties aan te pakken
- de integriteit van de huid te helpen beschermen
- het patiëntcomfort te bevorderen

Volg deze aanbevolen werkwijzen om ervoor te zorgen dat uw patiënten alle voordelen van het Progressa®-bedsysteem ervaren.<sup>1</sup>


**1. Bevestig de matras aan het frame met behulp van de bevestigingsknoppen.**



**2. Controleer of de stekker in het zitgedeelte goed is aangesloten.**



**3. Zorg ervoor dat de röntgenhoes aan beide kanten is dichtgeritst.**

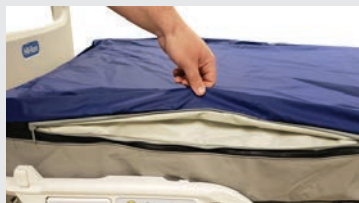

**4. Gebruik lakens die goed op de matras passen en minimaliseer de lagen beddengoed onder de patiënt, zoals lakens, hoelakens voor een optimale werking van het AD-matras.**

Neem voor meer informatie over producten of diensten contact op met uw Hillrom-verkoopvertegenwoordiger of bezoek onze website:



**hillrom.nl**  
**hillrom.be**

<sup>1</sup>171528 – Gebruikershandleiding Progressa®-bed.

Het Progressa-bed kan in verschillende situaties worden gebruikt, waaronder bij acute zorg zoals intensive care, afbouwende/progressieve zorg, medische/chirurgische zeer acute en subacute zorg, de PACU (Post Anesthesia Care Unit) en gedeeltes van de afdeling voor spoedeisende hulp (SEH). Medisch hulpmiddel (93/42/EEC): Klasse Im, klasse IIa voor therapie- en longtherapiematrassen. Aangemelde instantie: Polskie Centrum Badan I Certyfikacji S.A.(PCBC) CE1434. Schaalclassificatie (EN 45501): Klasse III. Fabrikant: Hill-Rom Holdings, Inc. - 1069 State Route 46 East - Batesville, IN 47006 - VS. Europese vertegenwoordiger: Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner, Frankrijk. Dit medische hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat op grond van deze regulering is voorzien van een CE-markering. Hill-Rom adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd, zorgvuldig te lezen. Het personeel van zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen.

Hill-Rom behoudt het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom toekent, is de uitdrukkelijke, schriftelijke garantie die wordt verstrekt bij verkoop of verhuur van zijn producten.