


SECTIE IV: Inline met beademingsprotocol

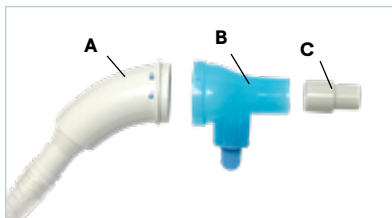

AFBEELDING 16



AFBEELDING 17

- Indien mogelijk moet de patiënt zich in een positie bevinden met het hoofdeinde van het bed in een hoek van meer dan 30 graden.
- Volg stap 1 tot en met 7 in SECTIE I: Voorbereiding voor het voorbereiden, monteren en aansluiten van het circuit op het apparaat.
- Controleer of de blauwe beademingsadapter (B, AFBEELDING 16) is aangesloten op de handset (A, AFBEELDING 16).
OPMERKING: gebruik de doorzichtige adapter voor spontane ademhaling niet voor deze opstelling.
- Sluit de inline beademingsadapter (C, AFBEELDING 16) aan op de uitgangspoort van de blauwe beademingsadapter (B, AFBEELDING 16).
- Gebruik de inline beademingsadapter om de handset aan te sluiten op de T-adapter met veerplug (AFBEELDING 17).
- Gebruik de CHFO-modus alleen voor inline gebruik. De CPEP-modus is niet vereist omdat het beademingsapparaat volumeondersteuning biedt.
- Pas de therapie toe volgens de instructies in SECTIE II: Handmatige therapie, of SECTIE III: Automatische therapie.
- Controleer hoe de patiënt op de therapie reageert.
OPMERKING: laat de patiënt niet onbeheerd achter tijdens de sessie.
- Pas indien nodig het beademingsalarm aan.
- Wanneer de behandeling is voltooid, verwijdert u de handset en adapter uit het T-stuk met veerplug en sluit u het T-stuk af voordat u de bedieningseenheid uitschakelt.
- Zet de beademingsalarmen terug naar de vorige instelling als deze is aangepast in stap 9.

Zie de gebruiksaanwijzing bij het Volara™-systeem (196654) voor gedetailleerde waarschuwingen, aandachtspunten en bedieningsinstructies.



Hillrom™

respiratorycare.hill-rom.com

Volara™ en Smart-Filter™ zijn handelsmerken van Hill-Rom Services PTE Ltd. Hillrom™ is een handelsmerk van Hill-Rom Services, Inc.

Hill-Rom behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom biedt, is de expliciete schriftelijke garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van zijn producten. Productafbeeldingen en labels dienen enkel ter illustratie. Het feitelijke product en label kunnen afwijken.

© 2020 Hill-Rom Services PTE Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. 196656NL REV 1 2020-08-11 NL




Hillrom™


Acute zorg met het Volara™-systeem
Instructiekaart

ONDERDELEN

- A Smart-Filter™
- B Beademings slang
- C Handset
- D Adapter, 22 mm x 22 mm
- E Vernevelaarset
- F Vernevelaarslang
- G Flexibele tracheostomieadapter (optioneel)
- H Mondstuk
- I Doorzichtige adapter voor spontane ademhaling (optioneel)
- J Zuurstoftoevoeradapter (optioneel)
- K Blauwe beademingsadapter (optioneel)
- L Aansluiting handset (optioneel)
- M Inline beademingsadapter 22 mm x 15 mm (optioneel)

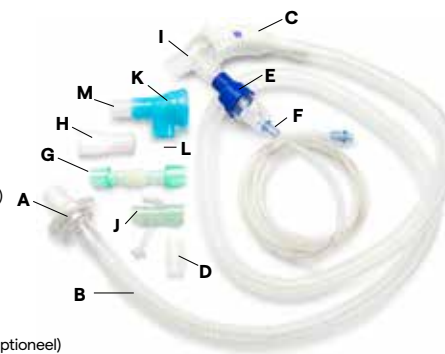

SECTIE I: Voorbereiding

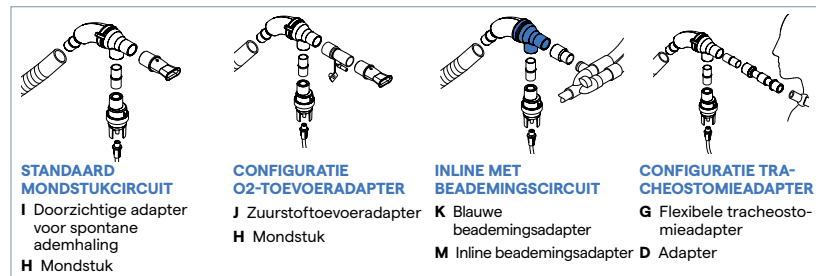

AFBEELDING 1

- Monteer het patiëntcircuit en de vernevelaar (AFBEELDING 1).
- Zorg ervoor dat de Smart-Filter™ is bevestigd aan de slang en is aangesloten op het apparaat met de tekst Smart-Filter™ aan de buitenkant (AFBEELDING 2).
- Vul de beker van de vernevelaar met medicatie of zoutoplossing.
- Sluit één uiteinde van de vernevelaarslang aan op de vernevelaarpoort op de bedieningseenheid (AFBEELDING 3).
- Sluit het andere uiteinde van de slang aan op de beker van de vernevelaar.
- Houd de **ON/OFF**-knop op de bedieningseenheid 5 seconden ingedrukt (AFBEELDING 4).
- Selecteer **MANUAL** (HANDM.) of **AUTOMATIC** (AUTOMATISCH) voor de therapie (AFBEELDING 5).




AFBEELDING 2



AFBEELDING 3



AFBEELDING 4

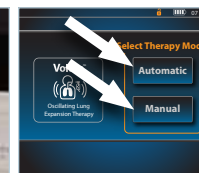

AFBEELDING 5

SECTIE II: Handmatige therapie

1. Gebruik de pijlen **OMHOOG/OMLAAG** om de gewenste druk te selecteren voor de therapiemodi CPEP en CHFO. Zorg ervoor dat de vernevelaar is ingeschakeld (AFBEELDING 6).



AFBEELDING 6

2. Druk op de knop **CHFO FREQ** (FREQ. CHFO) om de frequentie te selecteren: Low (Laag), Medium (Gemiddeld) of High (Hoog) (AFBEELDING 7).
3. Plaats de patiëntinterface op de patiënt.
4. Laat de patiënt weten dat de therapiemodus wisselt tussen CPEP en CHFO. Vraag de patiënt om te blijven ademen tijdens de overgangen.
5. Druk op **START** (AFBEELDING 8).



AFBEELDING 7



AFBEELDING 8

6. Druk op de knop **CPEP** (AFBEELDING 9) om de CPEP-therapie te starten. Hiermee stelt u de timer in voor de toediening van CPEP-therapie.
7. Druk op de knop **CHFO** om over te schakelen naar CHFO-therapie. Hiermee stelt u de timer in voor de toediening van CHFO-therapie.



AFBEELDING 9



AFBEELDING 10

8. Druk op **STOP** als de therapie sessie is voltooid (AFBEELDING 10). Er wordt een therapieoverzicht weergegeven.

SECTIE III: Automatische therapie

1. In de linkerbovenhoek wordt de laatst gebruikte vooraf ingestelde therapie weergegeven. Het systeem selecteert standaard de laatst gebruikte therapie (AFBEELDING 11).




AFBEELDING 11

2. Druk op de knop **CARE PLAN** (ZORGPLAN). Selecteer het gewenste therapieplan en druk op **START** (AFBEELDING 12).



AFBEELDING 12


2. Plaats de patiëntinterface op de patiënt.
3. Druk op **START** om de therapie te starten (AFBEELDING 13).

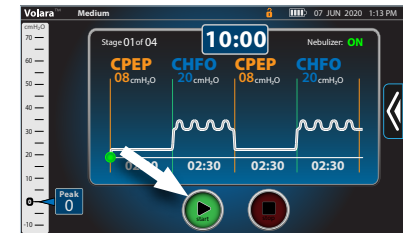

AFBEELDING 13

Help de patiënt zich zo goed mogelijk op therapieovergangen voor te bereiden door de groene bal op het scherm te volgen.

4. Druk op **PAUSE** (PAUZE) of **STOP** om de therapie te onderbreken of te stoppen. Druk op **RESUME** (HERVTTN) om door te gaan met een onderbroken therapie sessie (AFBEELDING 14).

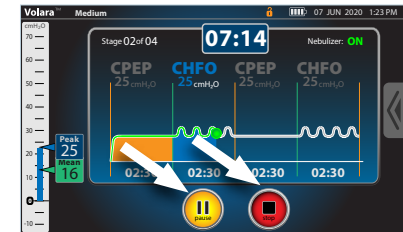

AFBEELDING 14

De maximale pauzetiijd is 3 minuten. Na 3 minuten stopt de sessie en wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven.

Wanneer de sessie is voltooid, wordt er een therapieoverzicht weergegeven (AFBEELDING 15).



AFBEELDING 15

5. Houd de **ON/OFF**-knop 5 seconden ingedrukt om de bedieningseenheid uit te schakelen.