


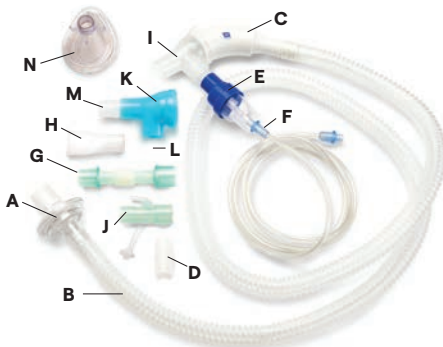


ONDERDELEN

- A Smart-Filter™
- B Beademings slang
- C Handset
- D Adapter, 22 mm x 22 mm
- E Vernevelaar
- F Vernevelaarslang
- G Flexibele trach-adaptor (optioneel)
- H Mondstuk
- I Doorzichtige adapter voor spontane ademhaling
- J Adapter met zuurstofpoort (optioneel)
- K Blauwe beademingsadapter (optioneel)
- L Aansluiting handset (optioneel)
- M Inline beademingsadapter 22 mm x 15 mm (optioneel)
- N Gezichtsmasker (optioneel)



SECTIE I: voorbereiding

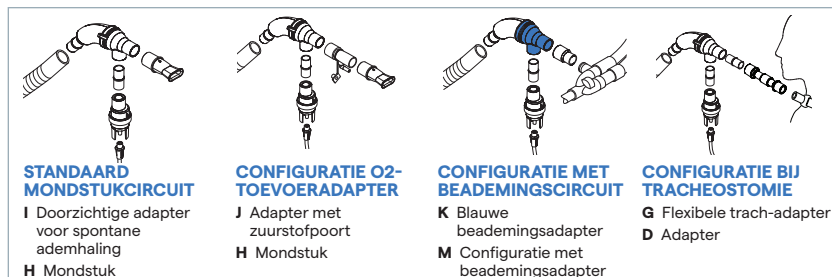

AFBEELDING 1

1. Monteer het patiëntcircuit en de vernevelaar (AFBEELDING 1).
2. Zorg ervoor dat de Smart-Filter™ is bevestigd aan de slang en is aangesloten op het apparaat met de tekst Smart-Filter™ aan de buitenkant (AFBEELDING 2).
3. Vul de beker van de vernevelaar met medicatie of zoutoplossing.
4. Sluit één uiteinde van de vernevelaarslang aan op de vernevelaarpoort op de bedieningseenheid (AFBEELDING 3).
5. Sluit het andere uiteinde van de slang aan op de beker van de vernevelaar.
6. Houd de **AAN/UIT**-knop op de bedieningseenheid 5 seconden ingedrukt (AFBEELDING 4).
7. Selecteer **AUTOMATISCH** als therapie (AFBEELDING 5).




AFBEELDING 2



AFBEELDING 3




AFBEELDING 4

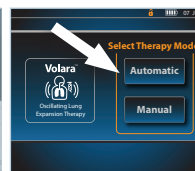

AFBEELDING 5


SECTIE II: automatische therapie

1. In de linkerbovenhoek wordt de laatst gebruikte vooraf ingestelde therapie weergegeven (AFBEELDING 6). Het systeem selecteert standaard de laatst gebruikte therapie.

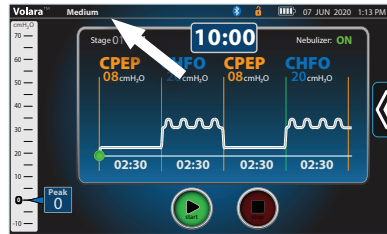

AFBEELDING 6


2. Plaats de patiëntinterface in de juiste positie op de patiënt.
3. Druk op **START** om de therapie te starten (AFBEELDING 7).

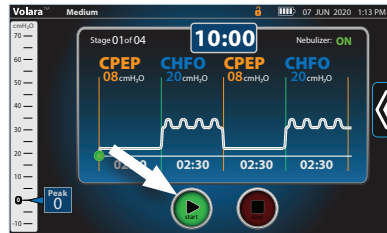

AFBEELDING 7

4. Druk op **PAUZE** of **STOP** om de therapie te onderbreken of te stoppen. Druk op **HERVATTEN** om door te gaan met een onderbroken therapiesessie (AFBEELDING 8).

De maximale pauzetijd is 3 minuten. Na 3 minuten stopt de sessie en wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven.

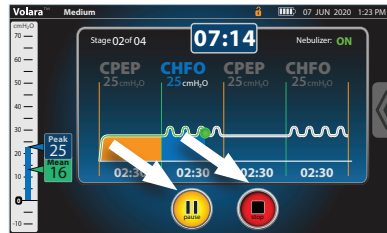

AFBEELDING 8

Wanneer de sessie is voltooid, wordt er een therapieoverzicht weergegeven (AFBEELDING 9).

5. Houd de **AAN/UIT**-knop 5 seconden ingedrukt om de bedieningseenheid uit te schakelen.




AFBEELDING 9

OPMERKING: als u een andere voorinstelling wilt kiezen, veegt u het tabblad met opties naar links en drukt u op de menuknop **CARE PLAN** (Zorgplan). Selecteer het gewenste therapieplan en druk op **START** (AFBEELDING 10).



AFBEELDING 10

SECTIE III: gebruik bij een beademde patiënt

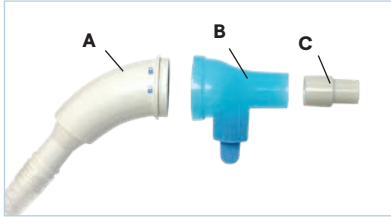

AFBEELDING 11



AFBEELDING 12

1. Indien mogelijk moet de patiënt zich in een positie bevinden met het hoofdeinde van het bed in een hoek van meer dan 30 graden.
2. Volg stap 1 tot en met 7 in SECTIE I: Voorbereiding, monteren en aansluiten van het circuit op het apparaat.
3. Controleer of de blauwe beademingsadapter (B, AFBEELDING 11) is aangesloten op de handset (A, AFBEELDING 11).
OPMERKING: gebruik de doorzichtige adapter voor spontane ademhaling niet voor deze opstelling.
4. Sluit de inline beademingsadapter (C, AFBEELDING 11) aan op de uitgangspoort van de blauwe beademingsadapter (B, AFBEELDING 11).
5. Gebruik de inline beademingsadapter om de handset aan te sluiten op de T-adapter met veerklap (AFBEELDING 12).
6. Gebruik de CHFO-modus alleen voor inline gebruik. De CPEP-modus is niet vereist omdat het beademingsapparaat volumeondersteuning biedt.
7. Pas de therapie toe volgens de instructies in SECTIE II: automatische therapie.
8. Controleer hoe de patiënt op de therapie reageert.
OPMERKING: laat de patiënt niet onbewaakt achter tijdens de sessie.
9. Pas indien nodig het beademingsalarm aan.
10. Wanneer de behandeling is afgerond, verwijdert u de handset en adapter uit het T-stuk met veerklap en sluit u het T-stuk af voordat u de bedieningseenheid uitschakelt.
11. Zet de beademingsalarmen terug naar de vorige instelling als deze zijn aangepast in stap 9.

SECTIE IV: het circuit voor gebruik bij één patiënt reinigen



WAARSCHUWING: om kruisbesmetting en/of schade aan de apparatuur te voorkomen, is het belangrijk om de volgende waarschuwingen en reinigingsinstructies te volgen:

- Vervang de Smart-Filter™ als deze beschadigd, zichtbaar vuil of nat is. Laat de Smart-Filter™ niet weken en was deze niet.



1. Koppel het patiëntcircuit los van de bedieningseenheid. Als u een vernevelaar gebruikt, koppelt u de vernevelaarset los van het patiëntcircuit.
2. Koppel alle onderdelen van het patiëntcircuit los.
3. Was de onderdelen van het patiëntcircuit (behalve de Smart-Filter™) in warm water met vloeibaar afwasmiddel.
4. Spoel de onderdelen met schoon water af.
5. Controleer de onderdelen op eventuele vuilresten.
6. Laat de onderdelen voorafgaand aan gebruik volledig drogen.

OPMERKING: houd de Smart-Filter™ altijd droog en schoon.

Zie de gebruiksaanwijzing bij het Volara™-systeem (196654) voor gedetailleerde waarschuwingen, aandachtspunten en bedieningsinstructies.



Hillrom™

respiratorycare.hill-rom.com

Volara™ en Smart-Filter™ zijn handelsmerken van Hill-Rom Services PTE Ltd. Hillrom™ is een handelsmerk van Hill-Rom Services, Inc.

Het Volara™-systeem is bedoeld voor de mobilisatie van secreties, longexpansiotherapie en de behandeling en preventie van longatelectase. Het systeem kan tevens extra zuurstof toedienen wanneer het wordt gebruikt met een zuurstoftoevoer. Medisch hulpmiddel (93/42/EEC): Klasse IIa. Aangemelde instantie: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297). Fabrikant: Hill-Rom Services Private Limited, 1 Yishun Avenue 7, Singapore, 768923. Vertegenwoordiger in de EU: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Ireland. Dit medische hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat op grond van deze regulering is voorzien van een CE-markering. Lees zorgvuldig de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die met de medische hulpmiddelen worden meegeleverd. Het personeel van zorginstellingen is verantwoordelijk voor het correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen.

Hill-Rom Services Private Limited behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen in ontwerp, specificaties en modellen. De enige garantie die Hill-Rom Services Private Limited biedt, is de expliciete schriftelijke garantie die wordt verleend op de verkoop van zijn producten.